

CliniFix®



Comfortabele fixatie van
katheters, lijnen en tubes

Gemaakt van huidvriendelijk
hydrocolloïd

Latex vrij

Productomschrijving

De CliniFix is een universele multifunctionele fixatiepleister en biedt comfortabele fixatie voor katheters, lijnen en tubes. De CliniFix is verkrijgbaar in twee maten:

- Small 10 stuks
- Large 10 stuks

De fixatiepleister is gemaakt van huidvriendelijk hydrocolloïd waardoor de pleister tot 7 dagen kan blijven zitten. Door de flexibiliteit van de CliniFix sluit deze optimaal aan op de huid.

CliniFix®

Gebruiksaanwijzing

1. Reinig en droog de huid. Indien nodig scheer de huid. Vermijd eventueel gebruik van zeep en crème (zie foto 1).
2. Verwijder het beschermepapier aan de achterkant van de pleister (zie foto 2).
3. Plaats de CliniFix op de huid en wrijf voorzichtig, gedurende 10 tot 20 seconden, zodat de hydrocolloid goed op de huid hecht (zie foto 3).
4. Open de strip met de blauwe pijltjes, plaats de lijn in de juiste positie en sluit de fixatiestrip (zie foto 4,5,6).



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Foto 4

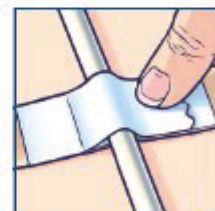
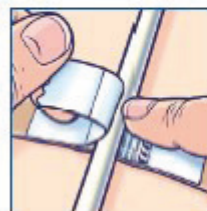


Foto 5

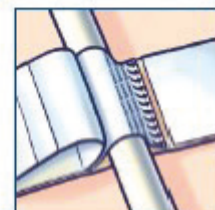


Foto 6

Product	CliniFix®
Inhoud	10 stuks
Artikelcode small	40-310
Artikelcode large	40-410