

**DRAFT**

# TIPS VOOR OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE BD AUTOSHIELD™ DUO VEILIGHEIDSPENNAALD




VOOR DE INJECTIE		
<b>Vraag de patiënt te gaan liggen of achteruit te leunen; vermijd zithouding.</b>	Het weefsel waarin geïnjecteerd wordt, is daardoor steviger/stabieler en dat maakt het activeren van de pennaald gemakkelijker.	
<b>Informeer eerst de patiënt over wat er gaat gebeuren en hoe de injectie kan aanvoelen.</b>	De patiënt zal minder vlug schrikken en onverwachte bewegingen maken. De zorgverlener zal daardoor minder vlug ongewild de pen terugtrekken van de huid, waardoor de naald vroegtijdig geactiveerd kan worden.	

TIJDENS DE INJECTIE		
<b>Hou de pen vast met één hand, in de handpalm.</b>	De andere hand kan dan gebruikt worden voor het nemen van een huidplooi of voor fixatie van de huid.	
<b>Maak indien nodig een brede huidplooi of fixeër de huid.</b>	Zo creëer je een stabiel injectie-oppervlak wat het activeren van de pennaald vergemakkelijkt.	
<b>Druk niet te hard door tijdens de injectie; lichte tegendruk geven volstaat.</b>	Door niet te hard door te drukken, vermijd je bloedingen, blauwe plekken, pijn en ongewenste intramusculaire injecties.	
<b>De transparante naaldbeschermer laat toe om de naald nog steeds te zien terwijl ze door de huid gaat.</b>	De naald bevindt zich volledig in de huid wanneer de doorschijnende naaldbeschermer zich terugtrekt en de witte huls in contact komt met de huid. Als je goed luistert, zal je op dat moment ook een klik horen van de naald ter bevestiging.	
<b>Bevestiging dat de hele dosis is toegediend, kan je zien als de pen op 0 staat en een correcte dossis is toegepast.</b>	Ook hier blijft de 10 seconden regel gelden. Dit is de correcte manier om de volledige dosis te injecteren vooraleer de naald uit de huid te verwijderen.	

## NA DE INJECTIE

<p><b>De activatie van de naald is zowel visueel en auditief vast te stellen.</b></p>	<p>Bij het terugtrekken van de naald uit de huid zal je een klik horen. Je ziet een rode indicatielijn aan de patiëntzijde en een oranje naaldbeschermer aan de penzijde.</p>	
<p><b>Na de injectie kunnen er mogelijk druppels insuline achterblijven op de huid.</b></p>	<p>Indien dit niet meer dan 1 à 2 druppels zijn, is dit normaal. Dat zijn dan de druppels van het ontluchten van de pen.</p>	
<p><b>Na de injectie zal je mogelijk rode stipjes zien op de huid.</b></p>	<p>Iedere injectie laat een klein rood stipje achter op de huid, vooral bij donkere huidtypes. Als het stipje groter is, kan dat wijzen op een allergische reactie. Echt grote vlekken kunnen wijzen op inflammatie of infectie.</p>	

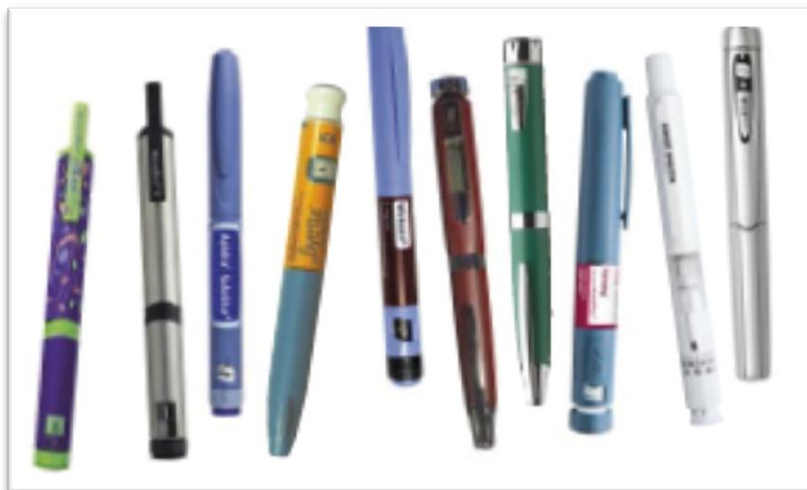

Zoals alle **BD Micro-Fine™+** en **BD Micro-Fine Ultra™** pennaalden past de **BD AutoShield™ Duo** op alle pennen die gebruikt worden voor de behandeling van diabetes.